



POLVO PROTECTOR PARA OSTOMÍA (NO ESTÉRIL)

Mantiene la piel seca y reduce la irritación por exudado.



POLVO PROTECTOR PARA OSTOMÍA (NO ESTÉRIL)

Polvo Protector para Ostomía:

Se utiliza sobre la piel peristomal para mantenerla seca, lo que a su vez reduce la irritación de la piel por exudado.

Pacientes con la ostomía como colostomía, yeyunostomía, ileostomía.

Características:

- Rápidamente absorbe el exceso de humedad de la superficie de la piel para que se mantenga seca.
- Se puede utilizar entre la piel peristomal y la barrera de la piel para formar una película fina y protectora sobre la superficie de la piel.

ESPECIFICACIONES


REF. No.	Botella	Descripción
SY02050	50 g	-No estéril



SY02050

CÓMO SE UTILIZA

Pacientes con la ostomía como colostomía, yeyunostomía, ileostomía.

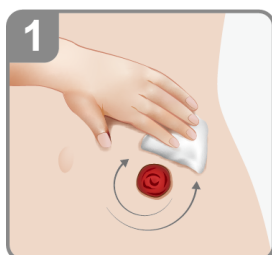


LIMPIAR

Limpie y seque la piel peristomal.



MOVER

Mueva la botella antes de abrir.

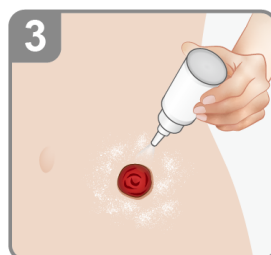

APLICAR

Apunte la boquilla al sitio previsto y aplique el polvo agitando la botella.



BORRAR

Borre el exceso de polvo suavemente para formar una película fina y protectora sobre la piel.



fortune
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com